


CLOSE PAD

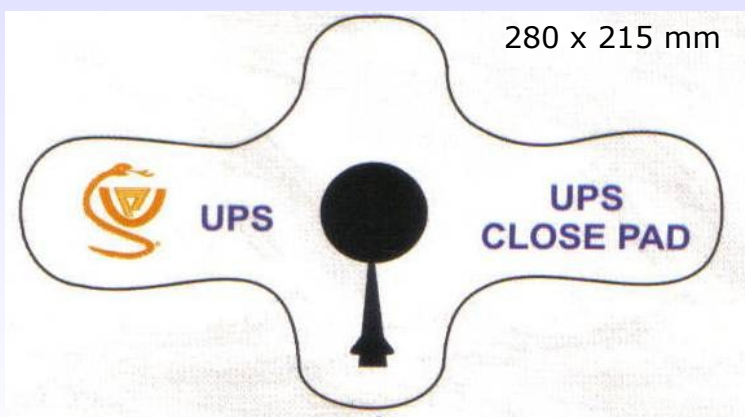

Close Pad è un sistema per l'emostasi femorale che garantisce una compressione attiva, sicura e costante sul sito di puntura. La finestra trasparente del bulbo che garantisce la compressione, consente la monitoraggio continua del sito di puntura. Il mantenimento di una compressione stabile e costante anche durante eventuali spostamenti, garantisce confort al paziente. Studi clinici hanno dimostrato che Close Pad è sicuro ed efficace nella riduzione dei tempi di compressione a seguito di procedure diagnostiche o interventistiche.



CE 1014



Via Garibaldi 40, 40026 Imola Bologna
P.IVA 02681411209

CLOSE PAD

CLOSE PAD

Istruzioni per l'uso:

1. Dopo breve compressione manuale posizionare Close Pad mantenendo la compressione.
2. Utilizzando una siringa da 50cc, gonfiare il bulbo gradualmente fino ad un massimo di 45 cc.
3. Verificare la perfetta adesione del dispositivo alla cute.
4. Dopo due ore dalla procedura diagnostica sgonfiare gradualmente il pallone e rimuovere il dispositivo.
5. Dopo quattro ore dalla procedura interventistica sgonfiare gradualmente il pallone e rimuovere il dispositivo.

	Diagnostica (min)	Interventistica (min)
Compressione attiva	5	10
Compressione Close Pad	120	240
Totale Compressione	125	250

La percentuale di complicanze è pari all'1% con il dispositivo Close Pad paragonato al 2.4% con compressione manuale.

Il livello di confort per il paziente è nel 90% dei casi superiore con l'utilizzo di Close Pad. Nel 10% dei casi è simile alla compressione manuale.

Codice	Lunghezza	RBP
90090101	26 cm	45 cc

